



**HEMOS SIMPLIFICADO
LAS RESTAURACIONES
DE ARCADA COMPLETA
FIJAS.**

**SIN TORNILLOS. SIN CEMENTO.
SIN RIESGOS.**

**ZD ZEST DENTAL
SOLUTIONS™**

ZEST | DANVILLE MATERIALS | PERIOSCOPY

www.zestdent.com/FTx

Ancladén

¿Qué pasaría si ya no fueran necesarios los tornillos ni el cemento para anclar una prótesis fija en los pilares?

¿Qué pasaría si se pudieran agilizar y simplificar las visitas para tratamiento?

¿Qué pasaría si se maximizaran la estética y la comodidad de los pacientes?

Estas preguntas fueron la base del diseño y el desarrollo del innovador y exclusivo sistema de anclaje fijo **LOCATOR F-Tx™ Fixed Attachment System**. A partir de los conocimientos técnicos acumulados durante muchos años con el sistema de anclaje LOCATOR® y los conocimientos sobre las soluciones de arcada completa para pacientes edéntulos, hemos trabajado intensamente para crear un sistema más simple y más eficiente para realizar restauraciones con implantes de arcada completa **FIJAS**.

Fijas para el paciente. Fáciles de extraer por el odontólogo.

Le damos la bienvenida a LOCATOR F-Tx: Sin tornillos. Sin cemento. Sin riesgos.

LOCATOR F-Tx™ UNA NUEVA FORMA DE ENTENDER LAS RESTAURACIONES DE ARCADA COMPLETA FIJAS.

LOCATOR F-Tx ES UNA SOLUCIÓN SIMPLE Y RÁPIDA para restauraciones de arcada completa fijas que no compromete la resistencia ni la estética de la prótesis. Este sistema, que ha sido optimizado para ser más eficiente y ahorrar tiempo en comparación con los sistemas convencionales de prótesis atornilladas, ofrece un novedoso anclaje a presión que elimina la necesidad de emplear cemento u orificios para el acceso al tornillo. Este sistema completamente integrado es una solución excepcional para una restauración provisional y se le puede adaptar la gama completa de opciones de restauración, entre otras, estructuras totalmente acrílicas, acrílicos reforzados con metal, de metal porcelana y totalmente de zirconio. El vanguardista y exclusivo LOCATOR F-Tx garantiza la satisfacción tanto del cliente como del odontólogo.



SIMPLICIDAD

Con el anclaje a presión y los mínimos componentes se simplifican los procedimientos. Además, el exclusivo diseño del sistema de anclaje fijo del LOCATOR F-Tx se adapta a distintos contextos divergentes/convergentes de hasta 40 grados entre implantes sin la necesidad de emplear pilares angulados.

RESISTENCIA Y ESTÉTICA

Sin cilindros, orificios de acceso al tornillo ni cabezas de tornillos que comprometan la estética o debiliten la prótesis. La capacidad de cada capuchón del anclaje dental de pivotar en el pilar hasta 20 grados en cualquier dirección permite que el capuchón se coloque en la ubicación ideal para la prótesis.

AHORRO DE TIEMPO

Se ahorra una cantidad de tiempo considerable en comparación con las técnicas convencionales para realizar una prótesis provisional inmediata. Las visitas de los pacientes también se agilizan y se simplifican gracias a la rápida y fácil extracción de la prótesis durante las visitas de seguimiento para impresiones finales y pruebas, así como en las visitas de seguimiento y en las revisiones posteriores.




PRÓTESIS CON RETENCIÓN MEDIANTE TORNILLOS CON ORIFICIOS DE ACCESO AL TORNILLO



LA PRÓTESIS DEL LOCATOR F-TX MANTIENE LA INTEGRIDAD Y LA ESTÉTICA

PRESENTAMOS EL LOCATOR F-TX™.

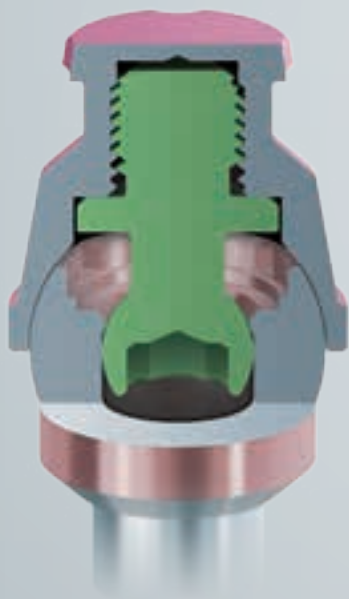

DISEÑO A PRESIÓN SEGURO

Este revolucionario sistema de retención funciona de una forma similar a una retención y un zócalo, ya que el capuchón del anclaje dental se coloca a presión de forma segura y luego puede pivotar hasta la posición deseada.

Una vez colocado, es fijo para el paciente, pero el odontólogo puede extraerlo fácilmente en las visitas para realizar limpiezas dentales y en las revisiones.

CORRECCIÓN DE ÁNGULO SIMPLIFICADA/ AJUSTE PASIVO SIN ESFUERZO

- El pilar del LOCATOR F-Tx presenta una exclusiva geometría esférica de la corona que permite que el capuchón del anclaje dental rote en cualquier dirección y corrija hasta 40 grados de convergencia/divergencia entre dos implantes, con lo que se elimina la necesidad de realizar pilares en ángulo.
- Los procedimientos que se realizan en la consulta al terminar la colocación de la prótesis garantizan un ajuste pasivo sin esfuerzo.

El capuchón del anclaje dental pivota 20 grados en cualquier dirección, lo que permite colocar el capuchón en la ubicación ideal para la prótesis.




SISTEMA REVOLUCIONARIO DE EXTRACCIÓN DE PRÓTESIS


Extraer la prótesis del LOCATOR F-Tx es una operación rápida y sencilla en la que se emplea un simple desplazamiento hidráulico para separar la prótesis de los pilares del LOCATOR F-Tx.



1. Se insertan almohadillas para prótesis bajo la prótesis entre esta y el tejido blando.

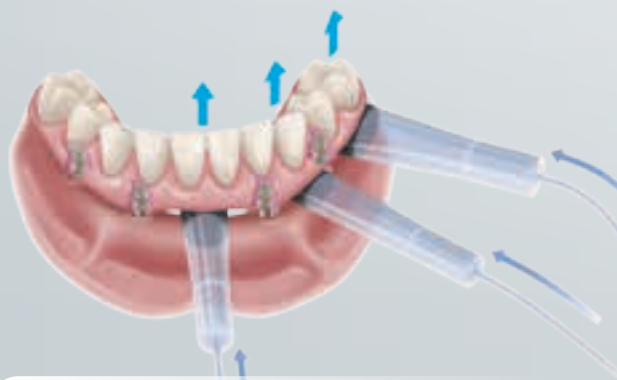

2. Se aplican almohadillas para prótesis rellenas de agua y se realiza el desplazamiento hidráulico.

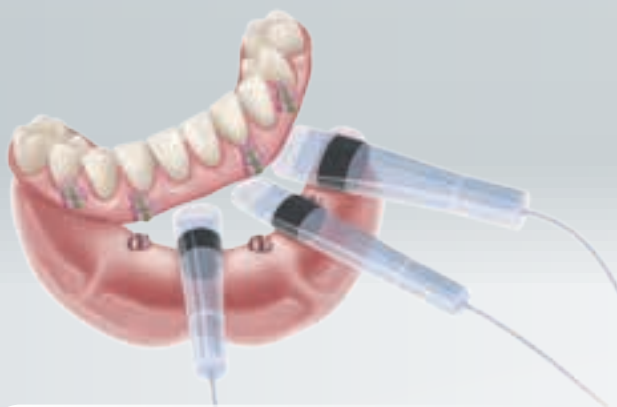

3. La prótesis se separa de los pilares del LOCATOR F-Tx.

EL PRIMER SISTEMA DE RESTAURACIÓN DE ARCADA COMPLETA FIJA SIN RIESGOS



CAPUCHÓN DEL ANCLAJE DENTAL

- El capuchón del anclaje dental se enrosca internamente para poder colocar una retención PEEK que se ajuste a presión en el pilar del LOCATOR F-Tx.
- Para mejorar la estética, incluye un acabado en rosa anodizado.
- Las ranuras agresivas y los tejidos limitan el movimiento vertical y de rotación.
- El capuchón del anclaje dental se extrae de forma pasiva de la prótesis mediante una técnica que se realiza en la misma consulta.

RETENCIONES/PROCESADO

- Las retenciones de retención PEEK están disponibles en niveles de retención bajo, medio o alto, según las necesidades de cada caso concreto.
- En el capuchón del anclaje dental viene preinsertada una retención de procesado y se proporciona otra adicional. Ambas se utilizan para procedimientos provisionales y de laboratorio.



BAJA



MEDIA



ALTA



PROCESADO



PILAR

- La exclusiva geometría esférica de la corona permite que el capuchón del anclaje dental corrija hasta 40 grados de convergencia/divergencia entre dos implantes y pivote en cualquier dirección para colocar los capuchones en la ubicación ideal para la prótesis.
- El recubrimiento DuraTec™ ofrece un exterior para pilar impermeable, suave y resistente con un tono estéticamente agradable para las encías.

PACK TODO EN UNO

- LOCATOR F-Tx se presenta en un pack todo en uno esterilizado y que incluye todo lo necesario. Pilar (con tapa para colocar el pilar en el lugar del implante), capuchón del anclaje dental con retención de procesado preinsertada, una retención de procesado adicional, así como una retención de color azul (retención **baja**), estaño (retención **media**) y verde (retención **alta**)





LOCATOR F-Tx™
FIXED ATTACHMENT SYSTEM

Para obtener más información sobre la simplicidad, el ahorro de tiempo y el exclusivo anclaje a presión del nuevo sistema de anclaje fijo LOCATOR F-Tx™, visite nuestra página en www.zestdent.com/ftx

©2016 ZEST Anchors LLC. LOCATOR and ZEST are registered trademarks and DuraTec, LOCATOR F-Tx and F-Tx are trademarks of ZEST IP Holdings, LLC.

**ZD ZEST DENTAL
SOLUTIONS™**

ZEST | DANVILLE MATERIALS | PERIOSCOPY

www.zestdent.com/FTx

Ancladén

93 417 29 84 | ancladen@ancladen.com | www.ancladen.com   